

FB Spray

DETERGENTE DESINFECTANTE PARA LA LIMPIEZA DE LAS SUPERFICIES ALTAS

TRATAMIENTO DE SUPERFICIES



VENTAJAS Y CUALIDADES

- Actividad sobre virus envueltos (Incluso Coronavirus)
- Sin CMR *, sin colorante, sin perfume
- Listo para su uso
- Limpieza y desinfección de las superficies en contacto con los productos alimenticios
- Activo sobre *Bacillus Subtilis* y sobre *Clostridium Difficile*
- Fácil de usar
- Compatibilidad con una amplia gama de materiales

* Cancerígenos, mutágenos y tóxicos para la reproducción



Fb Franklab®
notre expertise l'Ultra-Propreté



P.A.E

FB Spray

DETERGENTE DESINFECTANTE PARA LA LIMPIEZA DE LAS SUPERFICIES ALTAS

■ MODO DE USO

■ 1^{era} utilización del vaporizador:

- Usar guantes y desbloquear el vaporizador

■ Utilización :

- 1- Pulverizar de forma uniforme el **FB Spray** directamente en la superficie por tratar o sobre una toallita seca no tejida de uso único.
- 2- Repartir la solución sobre la superficie con una toallita.
- 3- El tiempo de contacto debe ser conforme a la actividad antimicrobiana requerida.
- 4- Dejar secar o secar con una toallita de uso único.

No necesita enjuague excepto indicación contraria del fabricante del revestimiento de la superficie tratada o para las superficies en contacto con productos alimenticios.

■ PROPIEDADES DESINFECTANTES

Actividad	Normas	Concentración	Tiempo de contacto
Bactericida	EN 13727 + A2 / EN 13697 / EN 1276 EN 14561	100%	1 minuto
		100%	5 minutos
Levuricida	EN 13624 / EN 1650 + A1 EN 13697 / EN 14562	100%	1 minuto
		100%	5 minutos
Fungicida	EN 13697 EN 1650/EN 13624/EN14562	100%	5 minutos
		100%	10 minutos
Virucida	EN 14476 +A1 <i>Rotavirus, PRV (virus modelo del hepatitis B), DBV (virus modelo del hepatitis C), Virus VRS</i> EN 14476 +A2 <i>Vaccinia Virus</i>	100%	5 minutos
Esporicida	NFT 72-230 / EN 13704 <i>B.Subtilis y Clostridium Difficile</i>	100%	15 minutos

■ PRECAUCIONES DE USO

Referirse a la Ficha de Seguridad (FS 010786)

■ CARACTERISTICAS

- Aspecto : **Líquido fluido**
- pH : **6±1**
- Caducidad : **3 años**

■ COMPONENTES

- Agentes de superficie no iónicos
- Cloruro de didecildimetilamonio

■ PRESENTACIÓN

- 1 Caja con 12 flacones de 500 mL ref. **10786160**
- 2 Caja con 12 flacons de 750 ml..... ref. **1078640**
- 3 Caja con 4 bidones de 5 L..... ref. **10786202**



Usar los biocidas con precaución. Leer la etiqueta y la información del producto antes de usarse.

FB Spray

DETERGENTE DESINFECTANTE PARA LA LIMPIEZA DE LAS SUPERFICIES ALTAS

RESUMEN

Todos hemos utilizado alguna vez un limpiador de superficies para limpiar un mantel, un banco o el salpicadero del coche.

La acción del **FB Spray** consiste en humedecer primero la superficie con un agente humectante no contaminado. El producto es lo más neutro posible y la acción mecánica de la mano hace el resto para eliminar cualquier contaminación de la superficie.

El spray es menos costoso de utilizar, pero sigue siendo necesario contar con la toallita seca, mientras que el paquete de toallitas FB es fácil de conseguir y ya está humedecido.

Elija su producto en función de su entorno y de la tarea que vaya a realizar.

Ver la ficha técnica de las FB Wipes para más información,

APLICACIONES

Tipo de suciedad

Para	Si	No
Grasa y aceite	✓	
Silicona		✗
Parafina	✓	
Leche y queso	✓	
Leche y yogurt	✓	
Azucar	✓	
Elemento proteínico	✓	
Pegamento		✗
Desinfección		✗
Mano		✗
Mano desinfección		✗
Suelo y superficie	✓	

Tipo de superficie

Para	Si	No
Acero inoxidable	✓	
Polietileno	✓	
Propileno	✓	
PVC	✓	
Aluminio	✓	
Otros plásticos		✗
Contacto Alimenticio	✓	
Vidrio		✗
Madera		✗
Uso en maquina		✗
Uso en remojo		✗
Piel humana		✗

Tipo de formula

Formula	Si	No
Acido		✗
Alcalino		✗
Neutro		✗
Espuma		✗
Enzimas		✗
Agentes secuestrantes		✗
TA aniónico		✗
TA no iónicos	✓	
TA catiónicos		✗
Desinfectante	✓	